

# MOBIAK CARE

## NÁVOD K OBSLUZE

### Chodítko ACTION

**0803610,0803611**

**CE**

 **Pokyny pro specializovaného prodejce**

Tento návod k obsluze je součástí dodávky a musí být součástí každého prodaného produktu. Verze: F, 2022-12

Všechna práva vyhrazena, včetně překladu.

Šíření jakékoliv části tohoto katalogu jakýmkoliv způsobem (tisk, kopie, mikrofilm nebo jiný způsob) bez písemného souhlasu vydavatele, nebo zpracování, duplikace či distribuce prostřednictvím elektronických systémů je zakázáno.

Chodítko ACTION mohou používat lidé s omezenou pohyblivostí pro cestování, pohyb venku i doma.



Specifikace:

- Hliníkový rám
- Nouzové brzdy s aretací na rukojeti
- Nastavitelná výška rukojeti
- Sedadlo uživatele a taška na přenášení
- Držák na láhev s vodou a vycházkovou hůl
- Skládací pro menší nároky na úložný prostor
- Pro vnitřní i venkovní použití
- Průměr koleček: 20 cm

ROZMĚRY:

| <b>0803610</b><br><b>0803611</b> | 43cm | 60cm | 60cm | 83-102cm | 6,5Kg | 136Kg |
|----------------------------------|------|------|------|----------|-------|-------|

Čistěte každou část chodítka. Používejte pouze vlhký hadřík a jemné mýdlo na povrchy, které potřebují čištění.

Před použitím chodítka dobře osušte. Pokud musíte produkt dezinfikovat, použijte běžný, mírný dezinfekční prostředek.

#### DŮLEŽITÉ!

Před použitím chodítka se ujistěte, že:

- Chodítka je plně rozložené je v této poloze zajištěno.
- Kolečka (pokud jsou k dispozici) jsou pevně upevněna.
- Ověřte funkčnost brzd.
- Před použitím sedačky musí být aktivována brzda.
- Držadla mají stejnou výšku a šrouby, které je připevňují k rámu, jsou utažené.
- Rám nemá žádné praskliny ani lomy.

Všechny operace provádí obsluha, která je proškolená k použití výrobku.

#### POZOR!!!

Pokud se vyskytne problém v některém z výše uvedených případů, **NEPOUŽÍVEJTE** chodítka, dokud nebude problém vyřešen.

#### DALŠÍ INSTRUKCE

- Chcete-li chodítka složit nebo rozložit, použijte rukojeti nebo tlačítka (pokud je k dispozici)
- Chodítka pravidelně čistěte.
- Nenechávejte chodítka mokrá.
- Nenechávejte děti v blízkosti chodítka bez dozoru.



#### OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Pokud jednoho dne zjistíte, že váš produkt je třeba vyměnit nebo vám již nefunguje, Je třeba zvážit ochranu životního prostředí:

- 1) Nevyhazujte svůj výrobek spolu s ostatním komunálním odpadem (to je také význam zobrazené recyklační značky).
- 2) Správná likvidace vašeho produktu napomáhá ochraně životního prostředí.

#### HLÁŠENÍ UDÁLOSTI:

Jakýkoli vážný incident, ke kterému dojde v souvislosti s používáním zařízení, musí být nahlášen Výrobci.

#### ZÁRUKA

Výrobek má záruku 2 roky. Záruka se vztahuje na výrobní vady & **NEVZTAHUJE** se na vady vzniklé nesprávným používáním, špatnou údržbou, úpravami, nadměrným používáním nebo nedodržení návodu k použití produktu. Nezahrnuje také opotřebované díly jako jsou brzdy a cokoli, co se během používání nebo časem poškodí. Poškození popř. závady způsobené: živelnými pohromami, neoprávněnou údržbou nebo opravou, napájením problémy (pokud jsou poskytovány), na přepravní společnosti se také nevztahuje záruka.

ES prohlášení o shodě

Jsme výhradně zodpovědní za prohlášení, že zdravotnické prostředky uvedené v tomto dokumentu prohlášení jsou třídy nízkého rizika (třída I) a splňují požadavky evropské nařízení 745/2017 a případně normy a právní předpisy na které je odkazováno.

## Návod

Otevřete bezpečnostní zámek a vytáhněte ovládací rukojeti (viz obrázek 1). Stiskněte postranní lišty, dokud neuslyšíte malé cvaknutí v plně složeném stavu pozici (viz obrázek 2). Před použitím se ujistěte že skládací mechanismus je zajištěn.



Zvedněte pojistku a zatlačte nebo vytáhněte rukojeť do správné výšky. Zatlačte dolů kryt, rukojeť nyní bude uzamčena ve správné výšce. (Viz obrázek 3)



Chcete-li umístit popruh tašky na tašku, umístěte poutko na přední konec, sedací tyč směrem ven. Zajistěte suchým zipem.



**VÝROBCE:**



MOBIAC S.A  
ΚΑΘΙΑΝΑ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ, ΧΑΝΙΑ - ΚΡΗΤΗ  
KATHIANA AKROTIRIOU CHANIA - CRETE  
T: +30 28210 63222 | WEB: [www.mobiakcare.com](http://www.mobiakcare.com)



## Symbole na etiketě, obalu či používané v manuálu



zdravotnický prostředek



výrobce



číslo produktu



výrobní číslo



šarže



unikátní označení produktu



udržujte v suchu



zacházejte opatrně



použití pouze ve vnitřních prostorech



označení CE



datum výroby



čtěte informace pro použití



nepoužívejte pokud je obal poškozen



nepokládejte



chránit před slunečním zářením