

NÁVOD K POUŽITÍ : PŘEDLOKETNÍ BERLE A ANATOMICKY TVAROVANOU RUKOJETÍ



REF:0808466, 0808467, 0808468



Zamýšlené použití:

Předloketní berle jsou pomůcky pro chůzi, které lze používat jednou rukou a jsou určeny pro osoby s omezenou pohyblivostí a potížemi s chůzí, pro handicapované nebo pro pacienty, kteří potřebují pomoc při pohybu nebo při rehabilitaci. Doporučuje se používat dva kusy současně, do každé ruky jeden. Mohou být také použity v případě, pokud zranění nebo operace vyžaduje, abyste chránili nohu před zatížením svou hmotností.

Sestavení:

Předloketní berle se dodávají smontované a připravené k použití. Pro nastavení výšky stiskněte tlačítko a posuňte předloktí do požadované výšky. Po dokončení se ujistěte, že tlačítko zcela vyčnívá přes požadovaný otvor.

Před použitím:

Zkontrolujte, zda není poškozený rám, aby bylo zaručeno bezpečné používání výrobku (na rámu nejsou žádné praskliny).

Zkontrolujte správnou montáž zařízení.

Zkontrolujte, zda je bezpečnostní podložka dobře utažena.

Údržba a čištění:

Každou část produktu často čistěte. Na povrchy, které je třeba vyčistit, používejte pouze hadřík a jemné mýdlo. Poté použijte čistý hadřík a před použitím produktu dobře osušte.

Pokud potřebujete produkt dezinfikovat, použijte běžný jemný dezinfekční prostředek.



POZOR (!): V případě poškození nebo nesprávné funkce vašeho produktu **NEPOUŽÍVEJTE** tento produkt a obraťte se na autorizovaného a vyškoleného zástupce.

Další instrukce:

Rukojeti předloketních berlí by měly být ve výšce boků pacienta.

Při držení rukojetí byste měli mít mírně pokrčené lokty. Mírně se předkloňte a umístěte berle na předloktí asi 35 cm před sebe. Začněte krok, jako byste chtěli použít zraněnou nohu, ale místo zraněné nohy přehodte váhu na předloktí. Vaše tělo by se mělo točit dopředu. Dokončete krok normálně nezraněnou nohou. Když je vaše nezraněná noha na zemi, posuňte předloktí berle dopředu jako součást přípravy na další krok. Soustředte se na zem, ne na nohy. U schodů se řídíme třemi jednoduchými pravidly: Jdeme nahoru nebo dolů po jednom schodu. Když jdeme nahoru: Nezraněná noha jde nahoru nejprve po zraněném a nakonec berle (ale na stejném kroku). Když jdeme dolů: berle jsou umístěny na další schod, po kterém následuje zraněná noha a nakonec nezraněná noha (vše na stejném schodu)



Ochrana životního prostředí:

Pokud jednoho dne zjistíte, že je třeba váš produkt vyměnit nebo vám již nefunguje, zvažte ochranu životního prostředí:

- 1) Nelikvidujte svůj výrobek společně s ostatním komunálním odpadem (toto je také význam zobrazeného recyklačního symbolu).
- 2) Obráťte se na své veřejné úřady a ty vás poučí o recyklačních střediscích, ve kterých musí být váš produkt zlikvidován.
- 3) Správná likvidace vašeho produktu napomáhá ochraně životního prostředí a také recyklaci součástí produktu.

Prohlášení o shodě:

Jsme výhradně zodpovědní za prohlášení, že zdravotnické prostředky uvedené v tomto prohlášení jsou třídy nízkého rizika (třída I) a splňují požadavky evropského nařízení 745/2017 a tam, kde je to vhodné, normy a právní předpisy, na které se odkazuje.

Záruka:

Na produkt je poskytována záruka po dobu jednoho (1) roku od data zakoupení. Záruka se vztahuje na výrobní vady a NEVZTAHUJE se na škody způsobené nesprávným používáním, špatnou údržbou, úpravami, nadměrným používáním nebo nedodržením návodu k obsluze produktu.

NEVZTAHUJE SE na části, které se mohou během používání nebo časem opotřebovat. Záruka se nevztahuje na škody nebo závady způsobené: přírodními katastrofami, neoprávněnou údržbou nebo opravou, závady způsobené při přepravě.

Reklamační formulář

Údaje o kupujícím

Jméno:

Datum nákupu: S/N

LOT: Telefon:

Údaje o prodejci

Název:

Adresa:

Telefon:

Razítko prodejce

HLÁŠENÍ UDÁLOSTI:

Jakákoliv závažná událost, ke které dojde v souvislosti s používáním prostředku, musí být nahlášena výrobci a příslušnému orgánu členského státu, ve kterém má uživatel a/nebo pacient bydliště.



MOBIAK S.A

ΚΑΘΙΑΝΑ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ, ΧΑΝΙΑ - ΚΡΗΤΗ

KATHIANA AKROTIRIOU CHANIA - CRETE


T: +30 28210 63222 | WEB: www.mobiakcare.com



MEDICAL • GASES • FIREFIGHTING est 1977

TECHNICKÉ VLASTNOSTI

		Rukojeť	A	B	MAX ZATÍŽENÍ	NÁHRADNÍ GUMOVÁ KONCOVKA	ODRAZKA
1	0808466	MODRÁ	92-117cm	70-96cm	120Kg	0809363	✓
2	0808467	ČERNÁ	92-117cm	70-96cm	120Kg	0809363	✓
3	0808468	ŠEDÁ	92-117cm	70-96cm	120Kg	0809363	✓

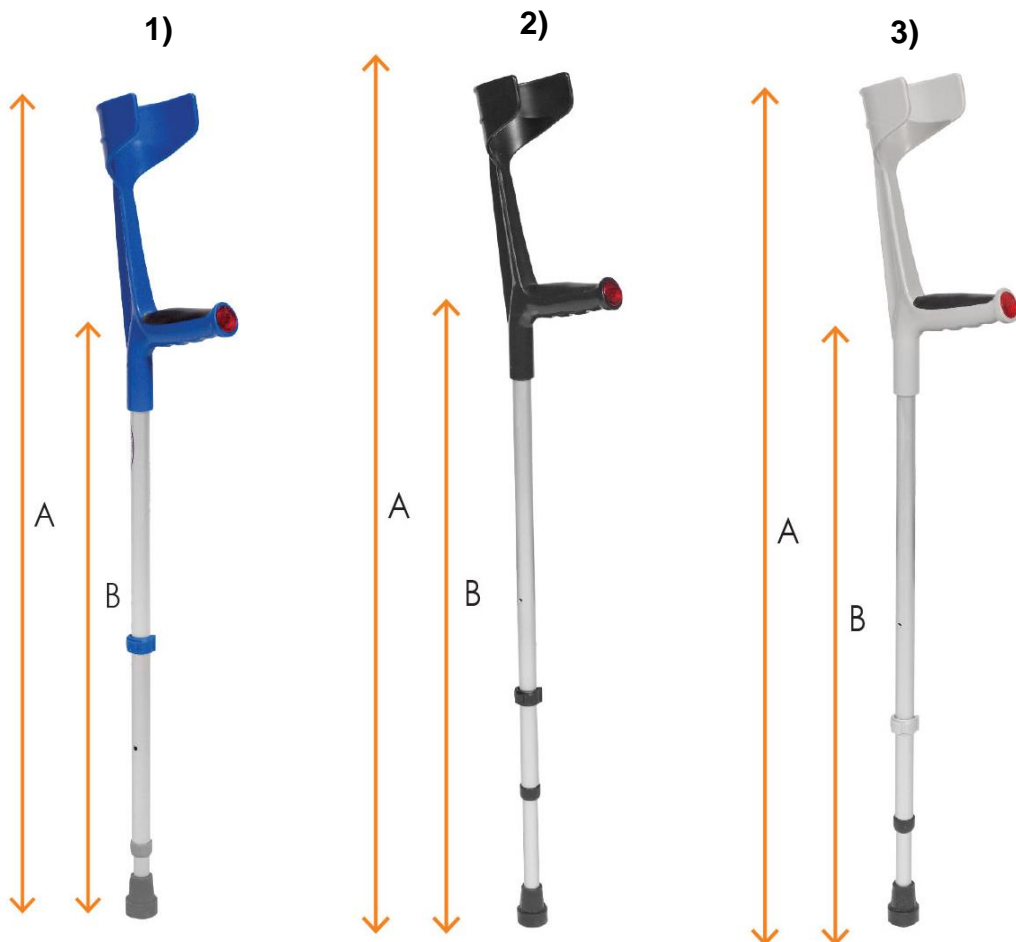



zdravotnický prostředek



výrobce



číslo produktu



výrobní číslo



šarže



unikátní označení produktu



udržujte v suchu



zacházejte opatrně



použití pouze ve vnitřních prostorách



označení CE



datum výroby



čtete informace pro použití



nepoužívejte pokud je obal poškozen



nepokládejte



chránit před slunečním zářením