

autosedačka **simon**

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA



1 Úvod

Děkujeme, že jste nám projevili důvěru a vybrali si autosedačku SIMON. Rádi bychom vás ujistili, že jsme vynaložili veškeré úsilí, aby cesta vašeho dítěte v naší autosedačce byla bezpečná a pohodlná. Bezpečnost, pohodlí a snadné používání jsou hodnoty, kterými jsme se řídili při navrhování naší autosedačky.



Před první instalací sedačky do vozidla si pečlivě přečtěte tento návod k použití a pokyny k vozidlu, do kterého bude sedačka instalována. Dodržování pokynů a doporučení uvedených v této příručce má přímý vliv na bezpečnost vašeho dítěte ve vozidle.

Pokud máte jakékoli pochybnosti o funkci sedačky, obraťte se na svého prodejce nebo přímo na nás:

support@simonseat.com

Přejeme vám šťastnou cestu.

2 Důležité informace a upozornění.

Autosedačka SIMON je zádržné zařízení pro děti se speciálními potřebami s výškou 100–150 cm. Je určena pro použití na sedadlech kategorie „i-Size“ v souladu s návodem k použití příslušného vozidla. Výrobek byl schválen pro použití v souladu s normou ECE R129/03. Po nastavení sedačky pro dítě vyšší než 135 cm zkontrolujte, zda se sedačka vejde na sedadlo ve vozidle. Speciální zádržný systém i-Size poskytuje dodatečnou podporu dětem, které mají potíže s udržením správné polohy ve

standardní autosedačky. Před prvním použitím sedačky se poraďte s lékařem, zda je zařízení pro vaše dítě vhodné.



Při instalaci dbejte na to, aby se zádržné prvky při běžném používání nezachytily při nastavení sedadel nebo zavřením dveří vozidla.



Pokud je dítě mladší 15 měsíců, nesmí se používat zádržné systémy otočené proti směru jízdy.



Dětský zádržný systém se nesmí používat, pokud není ve vozidle řádně upevněný, a to ani pro účely testování.



Bezpečnostní pásy, kterými je dítě připoutáno, musí být řádně utažené, nezkroucené a nastavené podle těla dítěte.



Bezpečnostní pásy a pomocné prvky pro držení těla dítěte musí odpovídat jeho postavě a nesmí by být zkroucené.



Pokud při používání sedačky dojde k nehodě, musí se vyměnit za novou.



Z bezpečnostních důvodů musí být všechna zavazadla a další předměty ve vozidle zajištěny proti náhodnému pohybu, protože v případě kolize mohou způsobit zranění.



Je zakázáno používat sedačku bez potahu nebo nahrazovat potah jiným potahem než doporučeným od výrobce.



Změny na sedačce a/nebo použití příslušenství, které není schváleno výrobcem, mohou snížit úroveň bezpečnosti sedačky SIMON. Takový výrobek se nesmí používat a výrobce neodpovídá za následky používání výrobku s provedenými změnami a/nebo použitým příslušenstvím.



Prvky sedačky vystavené slunečnímu záření se mohou zahřát, což může vést k popálení pokožky dítěte. Před použitím zkontrolujte teplotu sedačky. Pokud sedačku nepoužíváte, přikryjte ji, abyste ji chránili před teplem.



Z bezpečnostních důvodů nenechávejte dítě v autosedačce bez dozoru.

3 Popis autosedačky


1. Nastavitelná opěrka hlavy
2. Vložka opěrky hlavy
3. Vodítko ramenního pásu
4. Opěradlo sedačky
5. Ramenní opěrky
6. Postranní opěrky
7. Pětibodové (stabilizační) pásy
8. Sedadlo
9. Boční opěrky
10. Vodítka kyčelního pásu
11. Kolenní opěrky
12. Abduktor
13. Základna sedačky
14. Rukojeť pro nastavení sklonu sedačky
15. Knoflík pro nastavení sklonu sedačky
16. Rukojeť pro uvolnění zámku otáčení sedadla
17. Zajišťovací kolík
18. Rám ISOFIX
19. Konektory ISOFIX
20. Podpěrná noha
21. Opěrka nohou



Obr. 1



Obr. 2

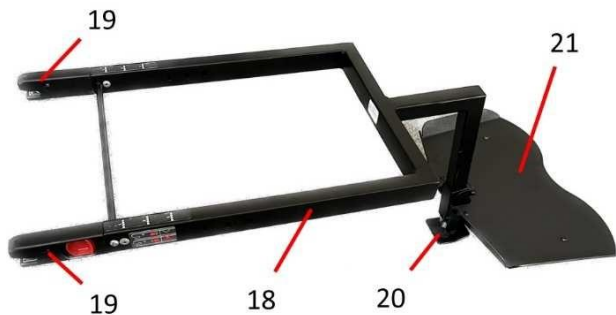

Obr. 3

4 Instalace do vozidla.



Sedačku lze instalovat pouze ve směru jízdy na přední i zadní sedadla vybavená systémem ISOFIX. Doporučujeme instalovat sedačku na zadní sedadlo.



Autosedačku SIMON lze instalovat pouze na sedadla vybavená třibodovými bezpečnostními pásy.



Obr. 4



Ujistěte se, že opěradlo autosedačky přiléhá svým povrchem k opěradlu autosedačky, na které je autosedačka SIMON nainstalována. Pokud opěrka hlavy sedadla vozidla brání přilnutí, je třeba opěrku hlavy odstranit. Před demontáží zkontrolujte, zda ji výrobce vozidla povoluje. Pokud tomu tak není, vyberte pro instalaci sedačky SIMON jiné sedadlo.



Požadavek na přilnutí opěradla k opěradlu autosedačky a jeho těsné uchycení může způsobit trvalou deformaci čalounění automobilu. Výrobce nenese odpovědnost za případné takto způsobené škody.



Při instalaci autosedačky SIMON do první řady sedadel posuňte autosedačku co nejvíce dozadu.



Před instalací sedačky do vozidla zkontrolujte, zda se ve vozidle nenacházejí ostré prvky, které by mohly poškodit čalounění. Kovová konstrukce

spodní části sedačky může vést k poškození citlivých částí čalounění vozidla.

4.1 Nejprve umístěte rám ISOFIX do vozidla.

Přichyťte konektory ISOFIX k upevňovacím bodům ISOFIX ve vozidle.



Obr. 5



Zkontrolujte, zda jsou prvky ISOFIX řádně připevněny a zda jsou vidět zelené indikátory. (Obr. 6)



Obr. 6

- 4.2 Nastavte opěrnou nohu tak, aby se její spodní část dotýkala podlahy vozidla, viz bod 7.9.



Obr. 7



Opěrná noha sedačky musí být nastavena tak, aby se dotýkala podlahy vozidla.

- 4.3 Připevněte autosedačku SIMON k rámu ISOFIX.



Obr. 8

Přitlačte sedačku SIMON co nejbliž k opěradlu sedadla automobilu výběrem polohy 1, 2 nebo 3 na rámu ISOFIX (obr. 9), poté vložte zajišťovací kolík (obr. 10) a utahením knoflíku zajistěte polohu sedačky ve zvolené poloze (1, 2, 3).



Obr.



Obr. 10

5 Nastavení sedadla

Montáž a nastavení sedačky SIMON lze provést mimo vozidlo.

1. Nastavte hloubku sedadla, viz bod 7.1.
2. Umístěte dítě do autosedačky.
3. Nastavte výšku opěradla, viz bod 7.2.
4. Nastavte a upevněte postranní opěrky, viz bod 7.3.
5. Nastavte a upevněte kyčelní opěrky, viz bod 7.4.
6. Stabilizujte polohu dítěte pomocí pětibodového pásu autosedačky SIMON, viz bod 7.5.
7. Nastavte a přizpůsobte opěrku hlavy, viz bod 7.6.
8. V případě potřeby upravte polohu abduktoru, viz bod 7.7.

6 Připoutání dítěte

Ved'te horní část tříbodového bezpečnostního pásu vozidla skrz vodítko ramenního pásu. (Obr. 11)



Obr. 11

Ved'te spodní část tříbodového bezpečnostního pásu vozidla skrz vodítko kyčelního pásu (obr. 12, obr. 13).



Obr.



Obr. 13

Zapněte bezpečnostní pás a dbejte na to, aby nebyl zkroucený.



Kyčelní musí vést co nejniž a pevně držet pánev.

Na obrázku 14 je znázorněno nesprávné vedení tříbodového bezpečnostního pásu. Pás musí vždy procházet vodičkou pásu.



Obr. 14


7 Nastavení:

7.1 Nastavení hloubky sedadla (obr. 15)

Chcete-li změnit délku sedadla (1), povolte zajišťovací šrouby (2) na obou stranách sedadla pomocí imbusového klíče vel. 4.

Poté uchopte přední okraj sedadla (1) a posuňte sedadlo do požadované polohy.

Po nastavení požadované polohy sedadla (1) utáhněte zajišťovací šrouby (2) na obou stranách sedadla.

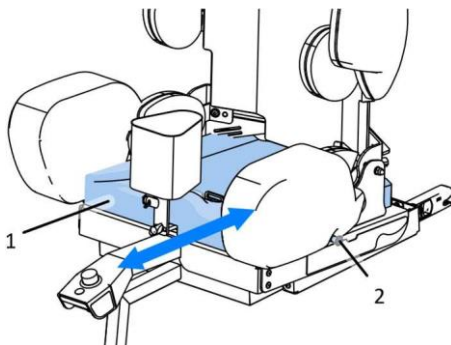


Obr. 15

Spolu se sedačkou jste obdrželi dvě sedadla, které se liší svou délkou. Kratší sedadlo je určené pro hloubku 30 až 35 cm, zatímco delší sedadlo je určené pro hloubku 35 až 40 cm.

7.2 Nastavení výšky opěradla (obr. 16)

Změnu nastavení výšky opěradla (1) zahájíte rozepnutím potahu sedadla SIMON.

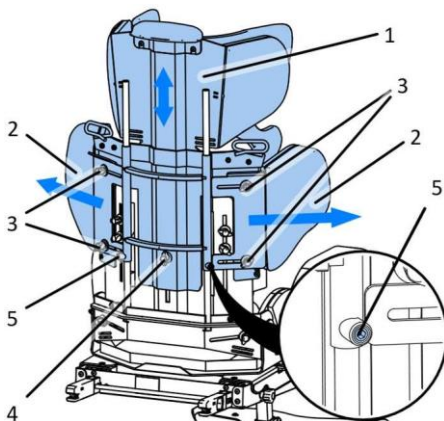

Obr. 16


Povolte nastavovací knoflíky (3) bočních opěrek (2), roztáhněte boční opěrky co nejvíce a zajistěte je v této poloze utažením knoflíků (3).

V dalším kroku povolte knoflík pro nastavení výšky opěradla (4) a pomocí imbusového klíče vel. 4 povolte dva zajišťovací šrouby (5).

Po nastavení požadované výšky utáhněte zajišťovací šrouby (5) a seřizovací knoflík (4) a upevněte potah.

Upravte polohu bočních opěrek (2) a přizpůsobte je prostoru ve vozidle tak, aby maximálně vyplňovaly prostor mezi sedačkou a dveřmi vozidla. Poté utáhněte seřizovací knoflíčky (3), a zajistěte tak polohy bočních opěrek.

Výšku nastavte tak, aby horní část tříbodového bezpečnostního pásu byla správně umístěna, jak je znázorněno na obrázku obr. 17.

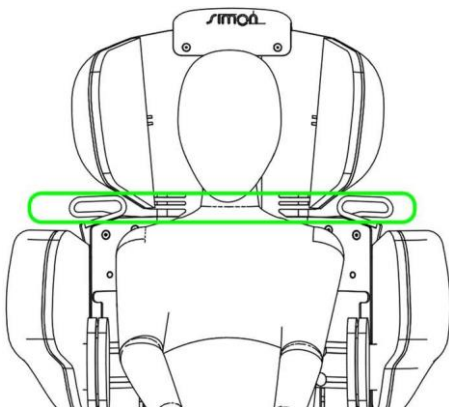

Obr. 17


7.3 Nastavení postranních opěrek, obr. 18

Nastavení polohy postranních opěrek (1) zahájíte rozepnutím potahu opěradla sedadla SIMON a odtažením bočních opěrek (2).

Poté povolte oba nastavovací knoflíky (3) dané opěrky. Každou opěrku (1) lze nastavit nezávisle, a to ve svislém i vodorovném směru.

Po nastavení požadované polohy opěrky (1) utáhněte nastavovací knoflíky (3).

Upravte polohu bočních opěrek (2) a přizpůsobte je prostoru ve vozidle tak, aby maximálně vyplňovaly prostor mezi sedačkou a dveřmi vozidla. Poté utáhněte seřizovací knoflíky zajišťující polohu opěrek.

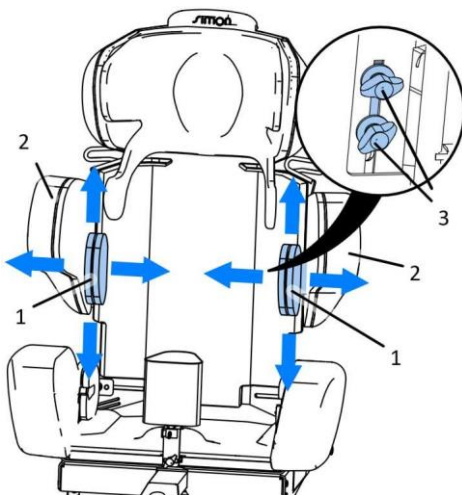


Obr. 18

7.4 Nastavení kyčelních opěrek, obr. 19

Polohu kyčelních opěrek (1) začněte nastavovat rozeprtím potahu sedadla SIMON.

Poté povolte nastavovací knoflík (2) dané opěrky.

Polohu každé opěrky (1) lze nastavit nezávisle. Po nastavení požadované vzdálenosti opěrek (1) utáhněte seřizovací knoflíky.

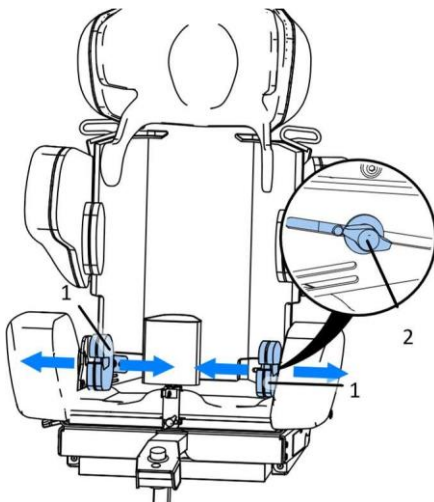

Obr. 19

7.5 Nastavení a ovládání pětibodového pásu (zapínání a rozepínání)

Autosedačka SIMON je vybavena pětibodovým stabilizačním pásem. Slouží k udržení správné polohy dítěte v autosedačce SIMON.




Používání pouze pětibodových bezpečnostních pásů během jízdy neposkytuje dostatečnou ochranu v případě nehody. Vždy používejte tříbodový bezpečnostní pás.

Po umístění dítěte do autosedačky umístěte ruce dítěte pod horní části pásů tak, aby pásy vedly přes ramena a nastavovací přezky byly ve výšce hrudníku dítěte. Dbejte na to, aby horní části pásu nebyly omotány kolem krku dítěte a nedřely ho.



Dbejte na to, aby horní části pásů nebyly omotány kolem krku dítěte a nedřely ho.


Poté složte obě přezky levého a pravého pásu do sobe a zatlačte je do centrální přezky připevněné k pásu mezi nohama, dokud neuslyšíte cvaknutí zámku, obr.20. Po správném zapnutí zámku se na indikátoru spony objeví zelená barva.

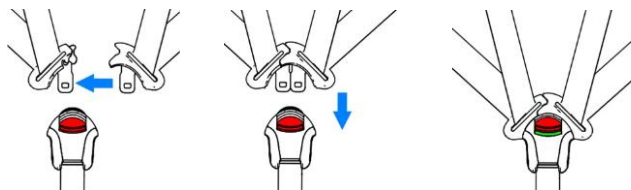

Obr. 20

Po zapnutí centrální přezky lze regulovat napětí popruhů pomocí nastavovacích spon (1) na hrudníku dítěte.


Zatáhnutím za pás (2) se pásy utáhnou a stabilizuje se poloha dítěte v autosedačce. Pokud je třeba změnit polohu nastavovací spony (1), upravte délku pásu (3). Chcete-li pás uvolnit, vytáhněte popruh (2) od spony se stisknutým tlačítkem (4). Obr. 21.

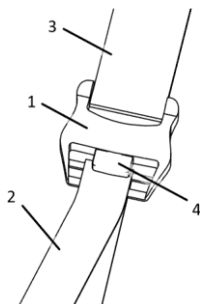

Obr. 21

7.6 Nastavení a přizpůsobení vložky opěrky hlavy, obr. 22

Vložku opěrky hlavy lze ohnutím jejích okrajů vytvarovat a upravit podle potřeb dítěte.

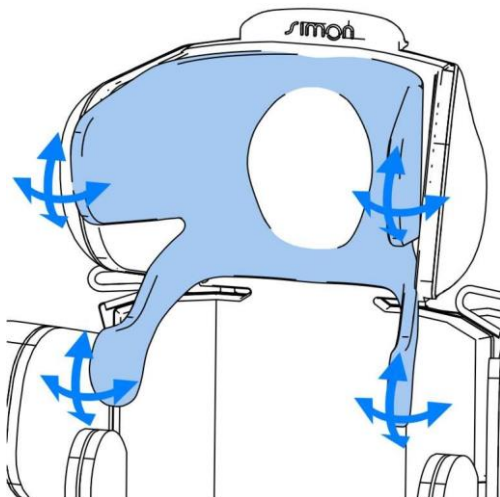


Obr. 22

7.7 Nastavení polohy abduktoru, obr. 23

Chcete-li změnit polohu nebo vyjmout abduktor (1), povolte knoflík (2); tím umožníte posun abduktoru podél sedadla. Po nastavení


požadované polohy abduktoru utáhněte knoflík (2), abyste jej zajistili na místě.

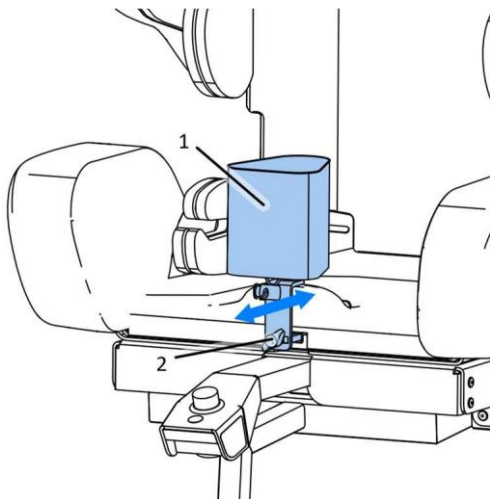

Obr. 23

7.8 Nastavení sklonu sedadla, obr. 24

Chcete-li změnit sklon sedadla, uchopte rukojeť pro nastavení sklonu sedadla (1), stiskněte a držte tlačítko (2). Po podržení tlačítka (2) lze plynule měnit sklon sedadla. Po nastavení požadované polohy sedadla uvolněte tlačítko a mechanismus se automaticky zablokuje ve zvolené poloze.

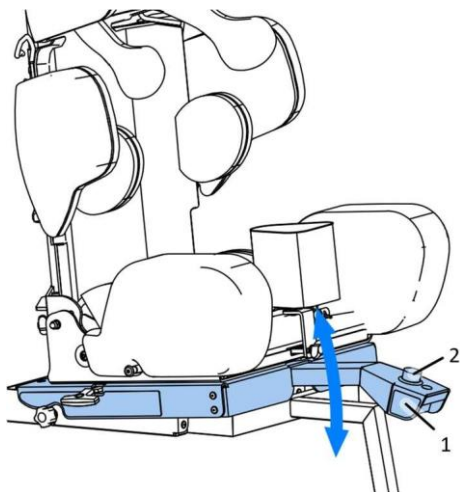


Obr. 24

7.9 Nastavení délky opěrné nohy, obr. 27

Chcete-li nastavit délku opěrné nohy (1), odšroubujte knoflík (2) a odstraňte šroub (3). Poté profil (1) vysuňte na požadovanou délku tak, aby se spodní okraj patky opíral o podlahu vozidla. Vložte šroub do otvoru (3) a utáhněte nastavovací knoflík (2).

7.10 Otáčení sedadla


Aby se používání sedačky bylo pohodlnější, je vybavena funkcí otáčení. Chcete-li otočný mechanismus odjistit, zatáhněte za páčku (1) a otočte sedačku. Funkci otáčení nepoužívejte, pokud je dítě připoutáno třibodovým bezpečnostním pásem. Při otáčení sedačky se ujistěte, že sedačka není v nakloněné poloze – náklonu. Po otočení sedačky do pozice pro jízdu se páčka (1) automaticky zasune a otáčení sedadla se zablokuje.

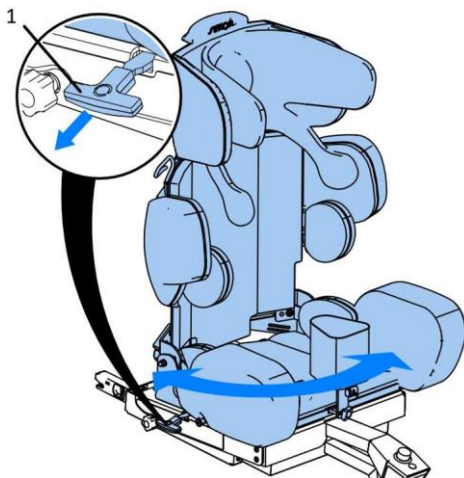

Obr. 25

7.11 Stolek

Sedadlo může být vybaveno stolem připevněným suchým zipem k potahu kolenních opěrek.

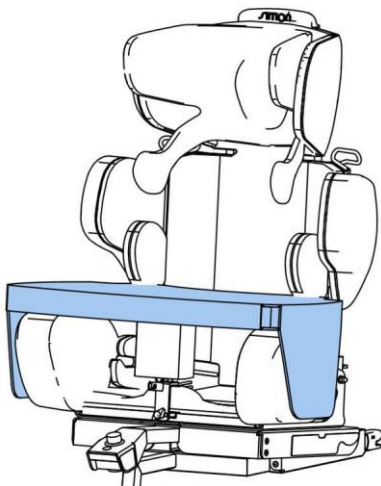


Obr. 26

7.12 Nastavení délky opěrné nohy, obr. 27

Chcete-li nastavit délku opěrné nohy (1), odšroubujte knoflík (2) a odstraňte šroub (3).

Poté profil (1) vysuňte na požadovanou délku tak, aby se spodní okraj patky opíral o podlahu vozidla.

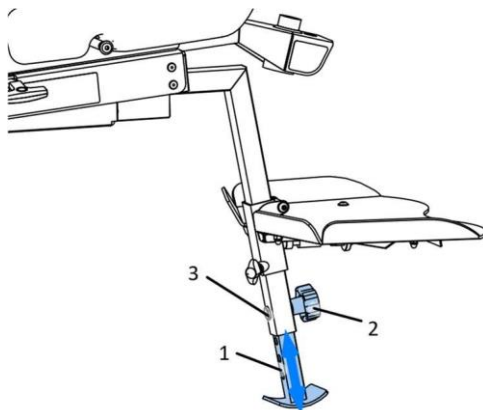

Obr. 27




Opěrná noha sedačky musí být nastavena tak, aby se dotýkala podlahy vozidla.

7.13 Nastavení výšky a úhlu opěrky nohou, obr. 28

Chcete-li změnit výšku opěrky nohou (1), povolte knoflík (2).
Po nastavení požadované výšky opěrky nohou utáhněte knoflík (2).
Pro nastavení úhlu opěrky nohou (1) použijte nastavovací knoflík (3) pod opěrkou.

Otáčením nastavovacího knoflíku (3) ve směru hodinových ručiček se úhel opěrky nohou zvětší, otáčením nastavovacího knoflíku (3) proti směru hodinových ručiček se úhel opěrky nohou zmenší.

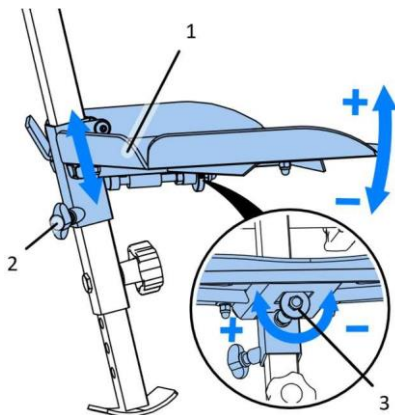

Obr. 28

8 Použití vestavěných reproduktorů

Autosedačka SIMON je vybavena dvěma vestavěnými reproduktory umístěnými v opěrce hlavy.

Chcete-li k nim připojit přehrávač, rozepněte potah opěradla sedačky SIMON a najdete kabel zakončený 3,5mm jack konektorem. Konektor je vhodný pro většinu MP3 přehrávačů a chytrých telefonů vybavených konektorem jack pro sluchátka. Pokud je zařízení vybaveno jiným typem

sluchátkového konektoru, je nutné použít vhodný adaptér (není součástí sady).

9 Čištění a údržba

Potah sedačky SIMON lze prát v pračce při teplotě do 30 °C. Při odstředování nepřekračujte 600 otáček za minutu.

Pěnové vložky je třeba před praním z potahu vyjmout.

Ostatní prvky sedačky čistěte vlhkým hadříkem nebo houbou. Je možné používat jemné čisticí prostředky.

Pohyblivé části sedačky nevyžadují pravidelnou údržbu ani mazání.

10 Záruka

Pokud zjistíte jakoukoli závadu nebo poškození, okamžitě přestaňte výrobek používat a kontaktujte prodejce nebo výrobce. Poškozený výrobek je třeba zajistit, aby se zabránilo rozšiřování poškozené oblasti. Nepokoušejte se výrobek opravovat sami. Nevyměňujte originální díly výrobku za díly vyrobené svépomocí nebo za díly z jiného zdroje, než je doporučeno výrobcem sedačky. Záruka se nevztahuje na poškození způsobená každodenním používáním, opotřebením prvků potahu nebo zhoršením kvality materiálů v důsledku stárnutí.



Vydání 1 – 2022

SIMON Sp. z o.o.
ul. Pojezierska 97B
91-341 Łódź, POLSKO