



MA ST390.01 A*_ENG_03 2023

POLOHOVACÍ NAFUKOVACÍ POLŠTÁŘ

NÁVOD

CZ

CE I Class Medical Device

REGULATION (EU) 2017/745 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND
OF THE COUNCIL of 5 April 2017 concerning medical devices

Děkujeme, že jste si zakoupili polštář OPERA řady MOPEDIA od Moretti. Polštáře jsou navrženy a vyrobeny tak, aby splňovaly všechny vaše potřeby pro praktické, správné a bezpečné používání. Tato uživatelská příručka poskytuje několik návrhů, jak správně používat produkt, který jste si vybrali, a poskytuje cenné rady pro vaši bezpečnost. Před použitím produktu si pečlivě přečtěte návod. Máte-li jakékoli dotazy, obraťte se na svého prodejce se žádostí o radu a pomoc.

Podušky pro pacienty řady MOPEDIA od Moretti jsou zařízení, která slouží k úlevě pacienta při sezení, odpočinku, v případě pooperačních průběhů.

The patient cushions of the line MOPEDIA by Moretti are devices to be used to give relief to the patient during sitting, rest, in case of post-operative courses.

POZOR!

- Nepoužívejte výrobek k účelům, které nejsou uvedeny v tomto návodu.
- Moretti S.p.A odmítá veškerou odpovědnost za jakékoli důsledky vyplývající z nesprávného použití tohoto produktu a z neoprávněných úprav rámu produktu.
- Výrobce si vyhrazuje právo změnit informace obsažené v tomto dokumentu bez předchozího upozornění.

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Moretti S.p.A. prohlašuje na svou výhradní odpovědnost, že produkt vyrobený a obchodovaný společností Moretti S.p.A. a patřící do skupiny POLŠTÁŘŮ PRO PACIENTY je v souladu s ustanoveními nařízení 2017/745 o ZDRAVOTNICKÝCH PROSTŘEDCÍCH ze dne 5. dubna 2017.

Za tímto účelem Moretti S.p.A. zaručuje a prohlašuje na svou výhradní odpovědnost následující:

1. Zařízení splňují požadavky na obecnou bezpečnost a výkon požadované v příloze I nařízení 2017/745, jak je stanoveno v příloze IV výše uvedeného nařízení.
2. Přístroje NEJSOU MĚŘICÍ PŘÍSTROJE.
3. Přístroje NEJSOU VYROBENY PRO KLINICKÉ TESTY.
4. Přístroje jsou baleny v NESTERILNÍ KRABICE.
5. Prostředky patří do třídy I v souladu s ustanoveními přílohy VIII výše uvedeného nařízení
6. Moretti S.p.A. poskytuje příslušným orgánům technickou dokumentaci k prokázání shody s nařízením 2017/745 po dobu nejméně 10 let od poslední sériové výroby.

Poznámka: Kompletní kódy produktů, registrační kód výrobce (SRN), kód UDI-DI a případné odkazy na použité předpisy jsou součástí prohlášení o shodě EU, které Moretti S.p.A. vydává a zpřístupňuje prostřednictvím svých kanálů.

OBECNÁ UPOZORNĚNÍ

- Pro správné používání zařízení si prosím pečlivě prostudujte tento návod.
- Zkontrolujte, zda vám byl výrobek dodán neporušený, a uchovávejte jej zabalený mimo zdroje tepla.
- Životnost zařízení je dána opotřebením dílů, které nelze opravit a/nebo vyměnit.
- Vždy dávejte pozor na přítomnost dětí.
- Správné používání zařízení vždy konzultujte se svým lékařem nebo terapeutem.
- Uživatel a/nebo pacient bude muset hlásit každou vážnou nehodu, která se stala v souvislosti se zařízením, výrobci a příslušnému orgánu státu, do kterého uživatel a/nebo pacient patří.



SYMBOLY



Produktový kód



Jedinečná identifikace produktu



CE známka



Výrobce



Čtěte návod k použití!



Zdravotnický produkt

Device



Podmínky likvidace



Nebělit



Prát v ruce; Max. teplota: 30°C



Nečistit chemicky



Nesušit v sušičce



Nežehlit

PŘED POUŽITÍM

- Zkontrolujte stav opotřebení dílů, aby bylo zaručeno používání zařízení v naprosté bezpečnosti pro osoby a věci



VAROVÁNÍ!

- Nepoužívejte zařízení bez obalu
- Nepoužívejte zařízení v přímém kontaktu s pokožkou
- Před použitím polštářku se ujistěte, že pacient nemá na těle ukotvené katetry, IV jehly, elektrody nebo jiná zařízení.
- Neotáčejte pacienta na stísněných plochách nebo na okraji lůžka
- Polštář nezaručuje stabilní statické umístění, doporučuje se použít jiné podpěry pro podepření pacienta v poloze proleženiny na boku

TECHNICKÉ ÚDAJE

CODES	MATERIAL	COVER	SIZE
ST390	PVC	100% Polyester	49x40x15 cm*

*měření se mohou lišit v závislosti na použitém tlaku

Poznámka: Všechny výrobky jsou odolné proti vznícení podle normy EN1021-1, ale doporučuje se věnovat zvýšenou pozornost otevřenému plameni, protože výrobky mohou i tak vzplanout



POUŽITÍ

- Položte polštář jemně pod nohy pacienta, jak je znázorněno na (obr. 1).
- Zvedněte polštář tak, aby nohy zapadly do opěrek nohou (obr. 2)
- Oběma rukama (jedna na zádech a druhá na polštáři) jemně otočte pacienta na bok (obr. 3).



(Fig.1)



(Fig.2)



(Fig.3)

ZÁRUKA

Na produkty Moretti se vztahuje záruka na vady materiálu nebo výrobní vady po dobu (dvou) 2 let od data nákupu, s výhradou omezení a výjimek uvedených níže. Záruka se nevztahuje na škody způsobené nesprávným používáním, zneužitím nebo úpravou výrobku a záruka nebude platná, pokud nebude přesně dodržován návod k použití. Správné zamýšlené použití zařízení je specifikováno v tomto návodu. Moretti nenese odpovědnost za škody způsobené zraněním osob nebo jinak způsobené nesprávnou instalací nebo nesprávným použitím nebo v souvislosti s nimi. Moretti neručí za poškození nebo závady produktů za následujících podmínek: přírodní katastrofa, neautorizovaná údržba nebo oprava, poškození v důsledku problémů s napájením (pokud jsou k dispozici) použití náhradních dílů nedodaných společnostmi Moretti, nesprávné použití, neoprávněná úprava, poškození při přepravě (jiné než původní zásilka Moretti) nebo v případě nedostatečné údržby, jak je uvedeno v návodu. Záruka se nevztahuje na součásti podléhající opotřebení při správném používání zařízení.

Výjimky

Kromě toho, co je výslovně uvedeno v této záruce a v omezeních zákona, společnost Moretti nenabízí žádné zastoupení, záruku nebo podmínku, výslovnou ani předpokládanou, včetně jakýchkoli prohlášení, záruk nebo podmínek prodejnosti, vhodnosti pro určitý účel, neporušení a rušení. Moretti nezaručuje, že používání výrobku Moretti bude nepřerušované nebo bezchybné. Doba trvání jakýchkoli implicitních záruk, které mohou být uloženy zákonem, je omezena na **záruční dobu v mezích zákona. Některé státy nepovolují omezení délky předpokládané záruky nebo vyloučení či omezení náhodných nebo následných škod v souvislosti s produkty pro spotřebitele. V takových státech nebo zemích se na vás nemusí vztahovat určitá vyloučení odpovědnosti a omezení této záruky. Tato záruka se může změnit bez upozornění.**

MORETTI S.P.A.

Via Bruxelles, 3 - Melegnano 52022 Cavriglia (Arezzo) Tel. +39 055 96 21 11

www.morettispa.com email: info@morettispa.com

MADE IN P.R.C. 